




PhysioMem® PM 100 – Kurzanleitung




1. Trageband befestigen

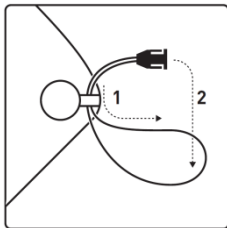

Befestigen Sie die beiden Schlaufen des Tragebandes jeweils an den Ösen des Gerätes und verbinden Sie das Trageband mit den Steckverbindern.

Stellen Sie die korrekte Länge des Tragebandes ein.


3. EKG aufzeichnen und senden

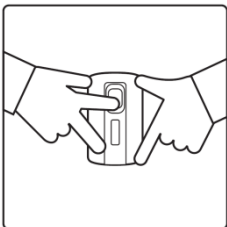

Halten Sie das Gerät ruhig und fest und drücken Sie die Taste. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen. Nach der Aufzeichnung wird das EKG

automatisch versendet.


2. Gerät anlegen

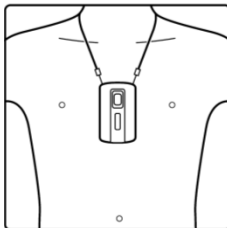

Positionieren Sie das Gerät in der Mitte Ihres Brustbeins und drücken Sie die Rückseite des Gerätes fest auf die Brust. Achten Sie darauf, dass sich

keine Kleidungsstücke unter den Elektroden befinden.

4. Batterie laden

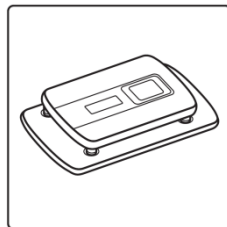

Verbinden Sie die Ladestation und das Netzteil mit dem Stromnetz. Legen Sie das Gerät rückseitig in die Vertiefungen der Ladestation. Der

Ladevorgang startet automatisch.